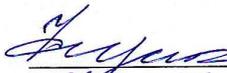


КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ «БОРОДИНСКИЙ»

СОГЛАСОВАНО:
Представитель работников


В.Г.Физик
«06» 08 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:


Директор КГБУ СО
«КНСОИ «Бородинский»
Дворянчик
2020 г.

ИОТ 011-2020

Инструкция по технике безопасности
при эксплуатации кресла-коляски

ИОТ 011-2020

Инструкция по технике безопасности при эксплуатации кресла-коляски

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. Данная инструкция разработана для работников краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Бородинский» (далее - Центр) предоставляющих кресло-коляски в аренду получателям социальных услуг Центра.

1.2. Кресла-коляски инвалидные складные предназначены для передвижения больных и инвалидов с частичной или полной потерей функций опорно-двигательного аппарата в условиях помещений и на площадках с твердым покрытием для преодоления незначительных расстояний.

1.3. При неисправности кресло-коляски прекратить эксплуатацию и сообщить об этом заведующему отделению или директору Центра.

1.4. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить заведующему отделению или директору Центра.

1.5. При эксплуатации кресло-коляски соблюдать порядок работы в соответствии с инструкцией по эксплуатации, правила личной гигиены, содержать кресло-коляску в чистоте.

1.6. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего распорядка и, при необходимости подвергаются внеочередной проверке знаний и правил охраны труда.

1.7. Ремонт кресло-коляски должен производиться в специализированных мастерских.

2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Провести внешний осмотр кресло-коляски, убедиться в отсутствии внешних повреждений.

2.2. Ознакомиться с паспортом кресло-коляски, знать и следовать пунктам паспорта.

3. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Пользоваться кресло-коляской только по назначению, согласно инструкции по применению. Следить за правильным обращением с кресло-коляской.

3.2. При посадке больного в кресло-коляску и высадке из нее колеса должны быть заторможены.

3.3. Не разрешается вставить на подножки, которые при посадке и высадке больного должны быть подняты в вертикальное положение.

3.4. Категорически запрещается эксплуатация изделия с неисправными тормозами.

4. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При появлении неисправности в работе кресло – коляски – прекратить ее эксплуатацию, сообщить об аварийной ситуации заведующему отделению или директору Центра.

4.2. Если произошел несчастный случай – оказать первую доврачебную помощь пострадавшему и сообщить в медицинское учреждение, а также заведующему отделению или директору Центра о случившемся.

5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИЮ РАБОТЫ

5.1. Привести в порядок кресло-коляску.

5.2. Обо всех выявленные недостатках в работе кресло-коляски сообщить администрации Центра.